


# 快速指南 - 拍摄 2D 图像

## 曝光期间的一般说明


患者应执行如下：

- 取下包括项链在内的所有首饰。
- 曝光期间不得吞咽。
- 让舌头保持在上颚处，以免空气滞留在口腔内。
- 曝光时紧闭嘴唇。
- 曝光期间保持不动。

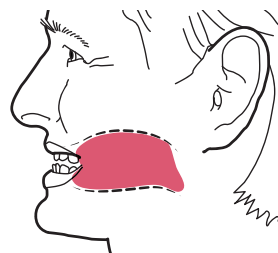

## 打开 X 线机


开/关按钮位于立柱顶部的下面。

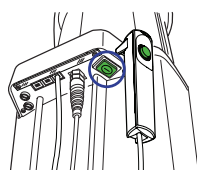

## 准备


### Planmeca Romexis™ 软件

- 1 选择全景曝光。

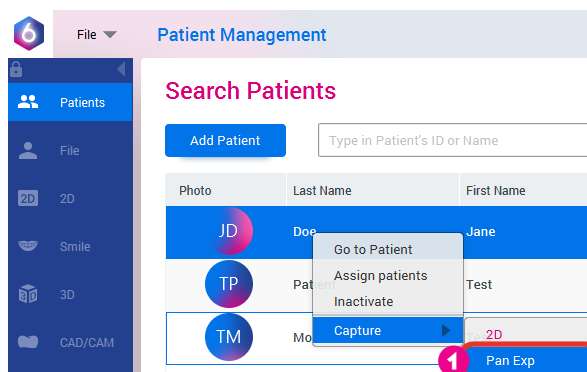


### Planmeca ProMax® X 线机

- 2 选择 2D 牙齿成像。
- 3 选择全景。
- 4 选择程序类型。

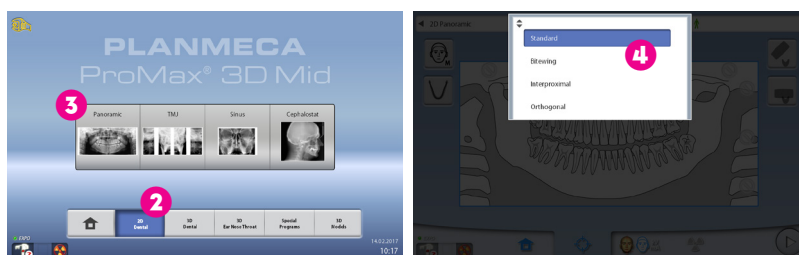


- 5 选择患者体型。
- 6 必要时应用分割功能。
- 7 继续后续步骤。

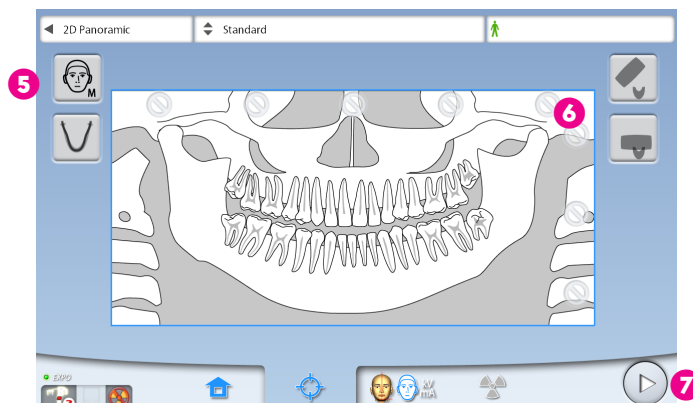

# 患者定位

- 1 根据患者身高用高度调节按钮调节 X 线机。
  - 2 让患者站立，将下巴放在颏托上，握住患者手柄，稍微向前迈一步，咬住咬件的两个凹槽。
  - 3 关闭颏夹支撑。
  - 4 以眶耳平面定位光束作为指引，通过上下移动 X 线机微调患者的头部位置。
  - 5 在患者的侧切牙和尖牙之间调整图层定位光束。
- \*另外，也可以使用 Planmeca ProMax® 2D S3 或 Planmeca ProMax® 3D 线机上的自动对焦功能。
- 6 观察患者头部相对于正中矢状平面定位光束是否平直。
  - 7 选择颌部形状和大小。
  - 8 继续后续步骤。

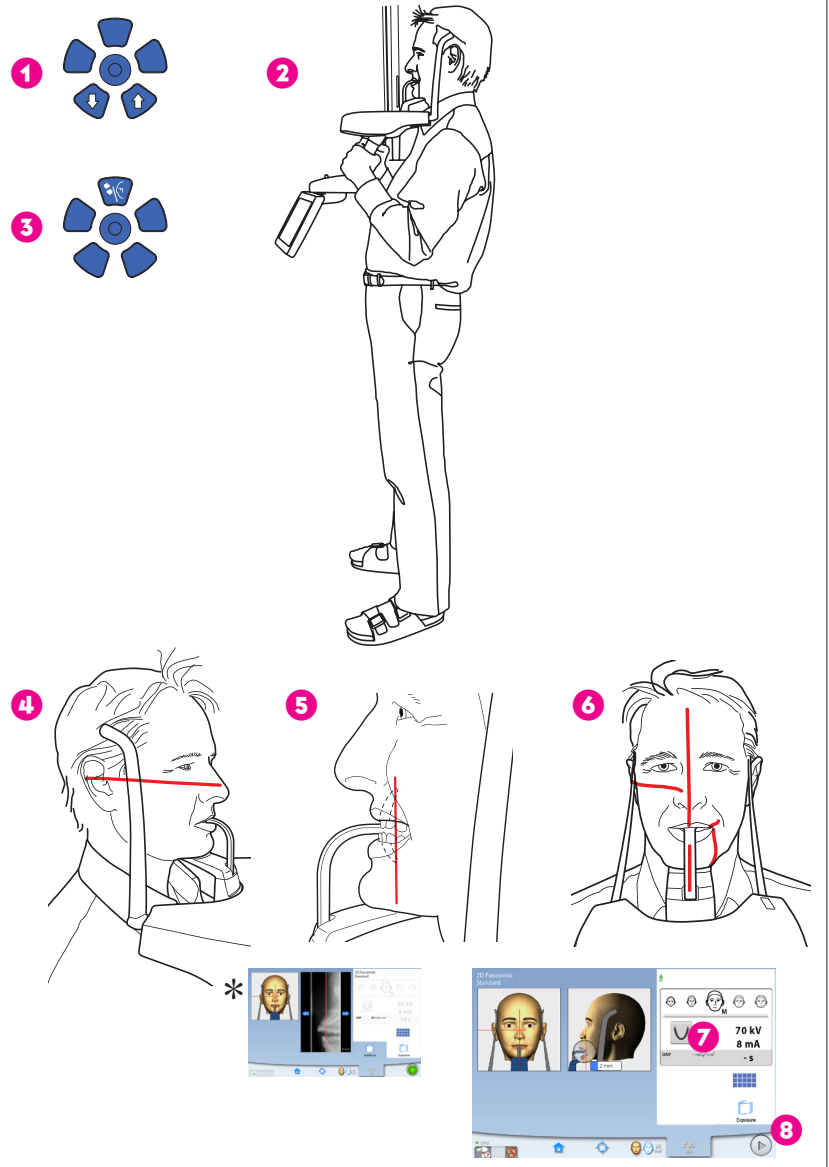

# 拍摄 2D 图像

## 拍摄图像

- 1 按住曝光按钮。
- 2 图像显示在电脑屏幕上。
- 3 完成程序。
- 4 指导患者远离 X 线机。

