


Техническое обслуживание фрезерной установки в период плановой приостановки работы

Перед периодом приостановки


Очистка крышки шпинделя и цанги

- 1 Нажмите значок **Collet cleaning** (Очистка шпинделя).
- 2 В установке PlanMill 40 выберите **Yes (Да)** и следуйте указаниям мастера очистки. В установках PlanMill 40 S и 30 S выберите **Clean caps and collets** (Очистка крышки и цанги) и следуйте указаниям мастера очистки.
- 3 После успешного процесса очистки закройте мастер.

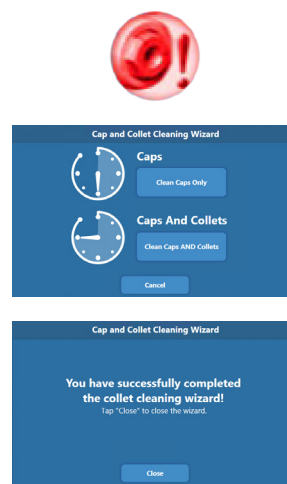

Опорожнение и очистка резервуара для жидкости

- 1 Нажмите значок **Clean fluid tank** (Очистка резервуара).
- 2 Опорожните и очистите резервуар для жидкости в соответствии с инструкциями к фрезеру и, когда мастер даст указание наполнить резервуар, заполните его *только горячей водой*.
- 3 В установках PlanMill 40 S и 30 S после заполнения резервуара автоматически начинается прокачка системы циркуляции. В установке PlanMill 40 перейдите в меню **Support Console** (Вспомогательная консоль) → **High Level** (Высокий уровень) → панель **Mechanical Control** (Механическое управление) → **Start Pump** (Запустить насос). Запустите циркуляцию горячей воды на 2–3 минуты, затем нажмите **Stop Pump** (Остановить насос).
- 4 После успешной прокачки системы циркуляции откройте крышку резервуара и опорожните и очистите его. Промойте фильтр и оставьте бак и извлеченный фильтр для сушки.
- 5 Тщательно очистите камеру фрезерования и ее крышку.
- 6 Выключите фрезер и отключите сетевое питание на задней панели установки. Оставьте крышку открытой. Нажмите кнопку питания на 5 секунд, чтобы завершить работу PlanMill 40 Job Server.

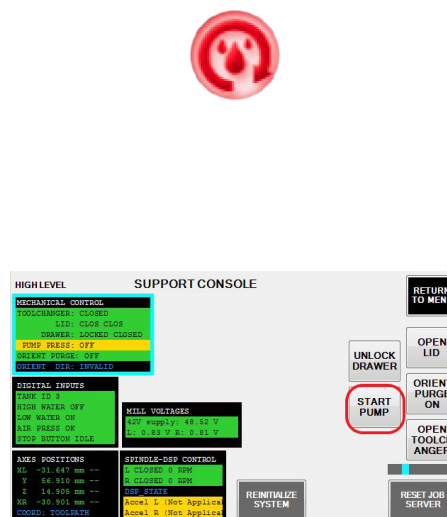

После периода приостановки

Запуск фрезерной установки

- 1 Включите фрезерную установку.
- 2 Если значок **Clean fluid tank (Очистить резервуар)** горит красным, перейдите к процессу очистки. В противном случае заполните резервуар водой и охлаждающей жидкостью.
- 3 Начните фрезерование.

Более подробные инструкции см. в руководстве пользователя. Авторское право Planmeca. Права на изменения защищены.

